

Manometer Skua/Pirol 2.0 VAC -30



902754 Manometer Skua/Pirol 2.0 VAC -30
902755 Manometer Skua/Pirol 2.0 VAC -90

Austausch des Manometers
Replacement of the manometer

1. Manometer so drehen, dass das Ziffernblatt zum Gasengang zeigt.
Turn the manometer that the dial faces the gas inlet.
2. Manometer herausziehen.
Pull out the manometer.
3. Neues Manometer mit Ziffernblatt zum Gaseingang zeigend einsetzen.
Insert a new manometer with the dial facing the gas inlet.
4. Manometer in die gewünschte Position drehen.
Turn the manometer to the required position.

Wartungen und Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Servicing and repairs must only be carried out by authorised expert personnel.

www.greggersen.de

GREGGERSEN Gasetechnik GmbH / Bodestr. 27-31 / 21031 Hamburg / Germany

2022-02-08 / M. Dels / B06012-00 Manometer Skua/Pirol Information



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902754

Beschreibung

Manometer Skua/Pirol 2.0 VAC -30

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum